

CE

NUGA

www.nuga.kr

[RUSSIAN]



E5



Руководство пользователя

Благодарим за покупку!

Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**



185, Джиреул-ро, Джиджеонг-мьен,
Вонджу-си, Гангвон-до, Корея

ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007

www.nuga.kr

RUSSIAN / CE H/H / Rev. 00
2016.01.07

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**

Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции	9
Согревающий прибор	10
Регулятор	12

Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия	14
Способ применения низкочастотных волн	14
Способ применения низкочастотных волн(низкочастотной рукоятки) ---	18
Канал1 Способ применения	19
Канал2 Способ применения	22
Способ использования функции нагрева	25
Способ применения регулятора	28
Низкочастотные волны	28
Способ использования Канала 1, 2	30
Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях ---	32

Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования ---	34
Пункты самопроверки	35
Прежде чем обратиться в сервисный центр	36
Возможные неисправности	37
Параметры изделия	38
Гарантийный талон	39

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией, указанной ниже, и используйте продукт надлежащим образом.
- Используйте продукт только в течение допустимого времени.
- Будьте осторожны, при одновременном использовании с другими устройствами могут возникнуть проблемы.
- При прекращении подачи электропитания немедленно выключите питание прибора.
- При возникновении на теле аллергических реакций и (или) иных раздражений немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к врачу.
- Использование продукта лицами, указанными ниже, запрещено.
 - Лица с острыми заболеваниями, со злокачественными опухолями, с повышенной температурой, беременные женщины
 - Лица с болезнями сердца (особенно лица, использующие кардиостимулятор)
 - Лица с нарушенной работой органов восприятия
- Не используйте продукт во время сна, есть вероятность получения ожога.
- Использование продукта на частях тела, указанных ниже, запрещено.
 - Глаза (область глазного яблока), половые железы, сердце, мозг, позвоночник, незрелая Q зона, нижняя часть живота во время беременности
- Использование продукта в местах ожогов, воспалений и т.д., а также зараженных бактериями частей кожи, запрещено.
- В данном руководстве уровень опасности классифицируется на 3 категории. Дальнейшие обозначения помогут разобраться, что может вызвать опасность или требует внимания в обращении.

Обозначения



Опасность

Серьезная угроза здоровью или жизни пользователя в случае нарушения указанных требований.



Предупреждение

Возможны тяжелые травмы или угроза жизни в случае нарушения указанных требований.




Внимание

Возможны незначительные травмы или повреждение имущества в случае нарушения указанных требований.

Примечания

- Производитель изделия, импортер и продавец не несут ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием со стороны пользователя.
- Руководство составлено на базе спецификации данной модели. Производитель продолжает совершенствование изделия и доработку его функций, что означает модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.

! Опасность

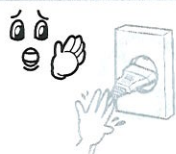

Во избежание поражения электрическим током и возгорания не выдергивайте шнур из розетки резкими движениями и не прикасайтесь влажными руками к штепсельной вилке, сетевым шнурам и проводам.




Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.



При наличии электрокардиостимулятора перед использованием изделия обязательно проконсультируйтесь с врачом.



Данный продукт не является водонепроницаемым. Не погружайте продукт в воду, не мойте и не стирайте, а также не храните длительное время в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванна и т.д. (Это может привести к поломке продукта, получению удара электрическим током и воспламенению.)

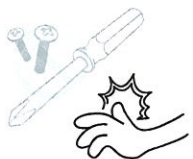

Строго запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

! Предупреждение



Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.



Запрещается кидать и трясти изделие, а также ставить на него тяжелые предметы. Рекомендуется беречь прибор от ударов и любых воздействий, которые могут нанести повреждение. Не перекручивайте и не перегибайте чрезмерно шнур питания, не пережимайте и не придавливайте тяжелыми предметами.



Нельзя регулировать работу прибора на панели управления ногами (это может стать причиной повреждения и поломки изделия). При использовании области нагрева и электродов низкочастотного тока, не оказывайте чрезмерное давление ногами. (Это может привести к поломке продукта.)



Во время использования не покрывайте корпус продукта одеялом. (Это может привести к поломке или воспламенению.)



Не ставьте на изделие зажженные свечи и сигареты, спиртное, электроприборы и любые легковоспламеняющиеся вещества или предметы, а также емкости с водой.



Внимание




Руководство
пользователя




Соблюдайте время и способы использования.



Если продукт не используется, отключите электропитание, нажав на кнопку питания на задней стороне прибора.
(Это может привести к перегреву и поломке продукта.)

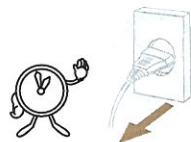

Если вы не используете изделие в течение длительного времени, не забудьте вынуть шнур питания из розетки.

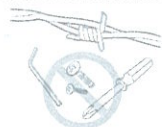

Не кладите на изделие колющие и режущие предметы.



Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие.



При подключении оборудования к электросети убедитесь, что его рабочее напряжение совпадает с напряжением в сети.
Подсоединяйте только в заземленное штепсельное гнездо.

E5




Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции ..	9
Согревающий прибор	10
Регулятор	12

Комплектация


Предупреждение
Перед установкой изделия обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
При обнаружении нехватки или повреждения деталей обратитесь к продавцу.
В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть характеристик могут быть изменены.

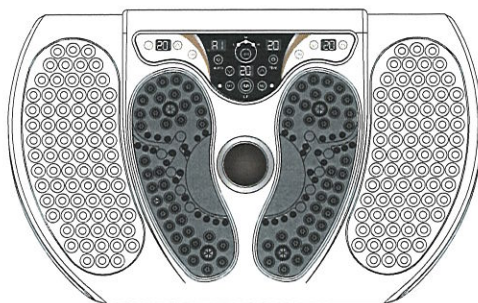


Согревающий прибор




Руководство пользователя

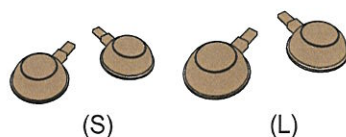

Низкочастотные накладки – S/L (4 шт.)

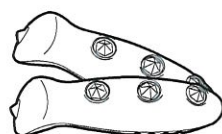

Низкочастотные рукоятки (2 шт.)

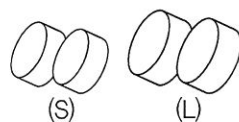

Губка для низкочастотных накладок – S/L (4 шт.)



шнур электропитания



Кабеля низкочастотных накладок (2 шт.)



Регулятор


Основные части изделия и их функции



Наименование	Функции
① Низкочастотные волны	Место подачи низкочастотных волн на человеческий организм
② Панель управления	Можно регулировать низкочастотные волны, низкочастотные накладки, низкочастотные рукоятки, нагревание и прочие питание и выход.
③ Дисплей отображения выхода низкочастотных волн	В процессе действия низкочастотных волн отражается состояние выхода частот.
④ Область нагревания	Область нагревания, получающая тепло от нагревательной панели.
⑤ Вилка электропитания	Кабель для подачи электропитания в корпус устройства.
⑥ Кабель низкочастотной накладки (низкочастотной рукоятки)	Электропроводящая резинка для подачи низкочастотного тока на тело человека.
⑦ Регулятор	Регулирует низкочастотные волны/канал 1,2

Основные части изделия и их функции


- Согревающий прибор

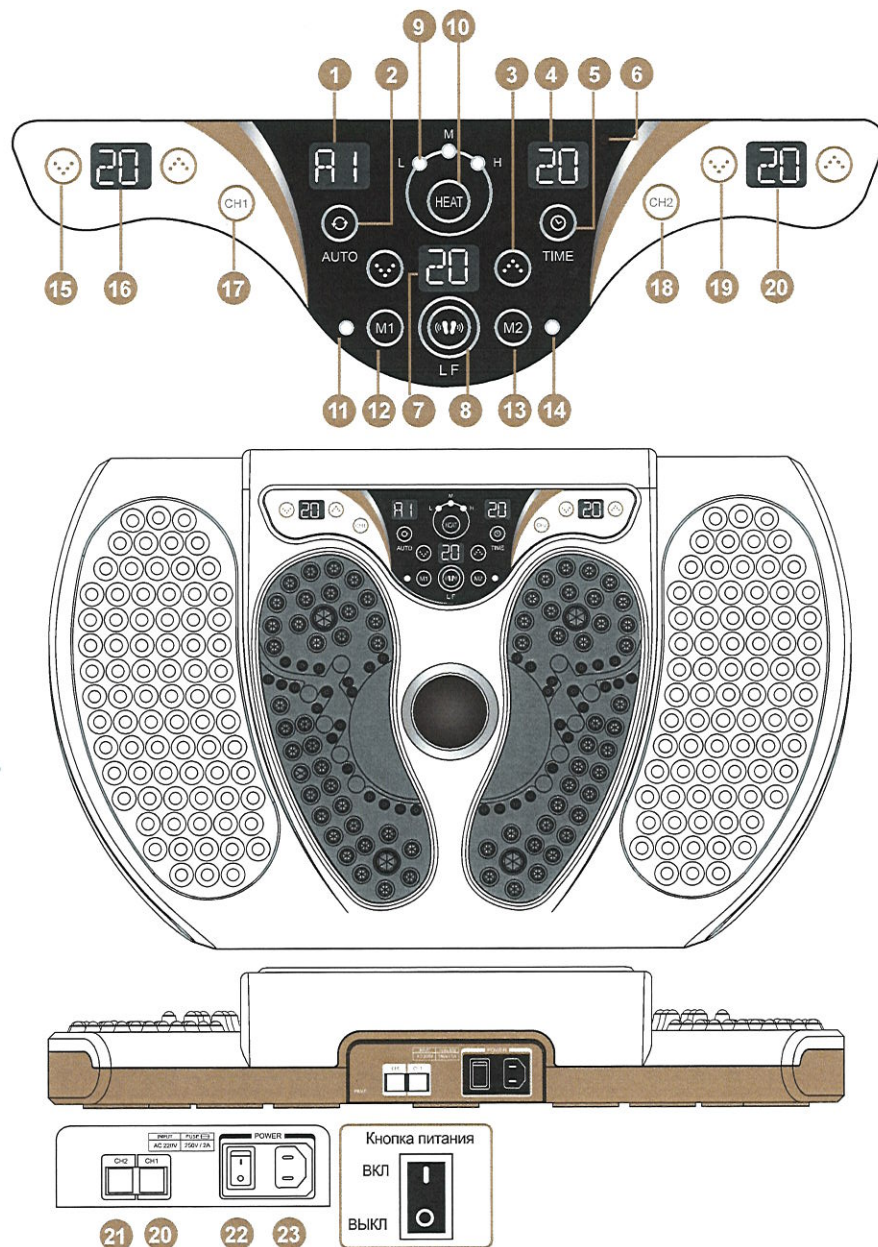

Наименование	Функции
① Дисплей отображения(FND) автоматического режима низкочастотных волн	Дисплей отображения(FND), отражающий автоматический режим низкочастотных волн
② Кнопка автоматического режима низкочастотных волн	Кнопка настройки автоматического режима низкочастотных волн
③ Кнопка регулировки мощности выхода низкочастотных волн	Кнопка с помощью, которой регулируется мощность выхода низкочастотных волн
④ Дисплей отображения(FND) времени действия низкочастотных волн	Дисплей отображения(FND) отражающий время действия низкочастотных волн
⑤ Кнопка установки времени низкочастотных волн	Кнопка настройки времени действия низкочастотных волн
⑥ Датчик приема регулятора	Входной узел для введения сигналов для работы изделия во время действия регулятора
⑦ Дисплей отображения(FND) выхода низкочастотных волн	Дисплей отображения(FND) отражающий мощность выхода низкочастотных волн
⑧ Кнопка включения/выключения низкочастотных волн	Кнопка включения/выключения действия низкочастотных волн
⑨ Лампа (LED) отображения настроек температуры нагрева	Лампа (LED), отображающая настройку температуры нагрева.
⑩ Кнопка включения / выключения нагревателя	Кнопка для включения питания нагревателя и установки температуры.
⑪ Сохранение 1 индикатор(LED) отображения действия	Сохранение 1 индикатор(LED) отображающий состояние действия
⑫ Сохранение 1 Кнопка действия	Кнопка действия режима Сохранение 1
⑬ Сохранение 2 Кнопка действия	Кнопка действия режима Сохранение 2
⑭ Сохранение 2 индикатор(LED) отображения действия	Сохранение 2 индикатор(LED) отображающий состояние действия
⑮ Кнопка регулировки выходной мощности Канала 1	Кнопка регулировки мощности низкочастотных волн Канала 1
⑯ Область отображения мощности Канала 1 (FND)	Область отображения выходной мощности Канала 1 (FND).
⑰ Кнопка включения / выключения Канала 1	Кнопка для включения / выключения работы Канала 1.
⑱ Кнопка включения / выключения Канала 2	Кнопка для включения / выключения Канала 2.
⑲ Кнопка регулировки выходной мощности Канала 2	Кнопка регулировки мощности выходных низкочастотных волн Канала 2
⑳ Область отображения мощности Канала 2 (FND)	Область отображения выходной мощности Канала 2 (FND).
㉑ Контактный выход Канала 1	Контактный выход Канала 1.
㉒ Контактный выход Канала 2	Контактный выход Канала 2.
㉓ Выключатель главного электропитания прибора	Выключатель главного электропитания прибора. (Включение / выключение главного электропитания прибора).
㉔ Гнездо кабеля электропитания	Гнездо для подключения кабеля электропитания

Основные части изделия и их функции

- Регулятор

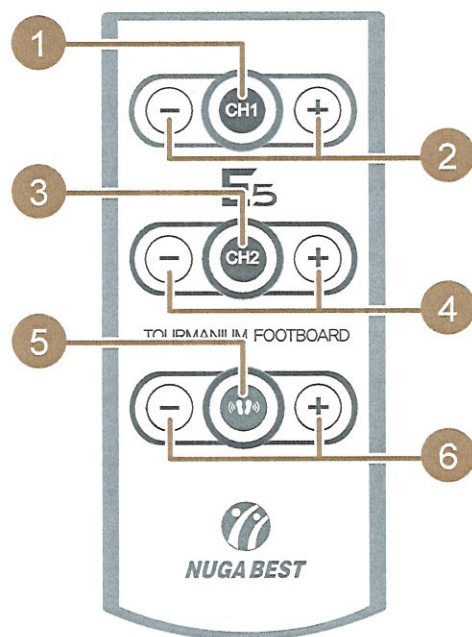

Наименование	Функции
① Кнопка включения / выключения канала 1(CH1)	Кнопка включения / выключения работы канала 1.
② Кнопка регулировки выходной мощности канала 1(CH1)	Кнопка регулировки выходной мощности канала 1 (CH1).
③ Кнопка включения / выключения канала 2(CH2)	Кнопка включения / выключения работы канала 2 (CH2).
④ Кнопка регулировки выходной мощности канала 2(CH2)	Кнопка регулировки выходной мощности канала 2 (CH2).
⑤ Кнопка включения / выключения низкочастотной площадки для ног	Кнопка включения / выключения низкочастотной площадки для ног
⑥ Кнопка регулировки мощности работы низкочастотной площадки для ног	Кнопка регулировки мощности работы низкочастотной площадки для ног

E5



Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия

14

Способ применения низкочастотных волн

14

Способ применения низкочастотных волн (низкочастотной рукоятки)

18

Канал1 Способ применения

19

Канал2 Способ применения

22

Способ использования функции нагрева

25

Способ применения регулятора

28

Низкочастотные волны

28

Способ использования Канала 1, 2

30

Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях


32

Порядок подготовки и использования изделия

- («LF») Способ применения низкочастотных волн

Информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.

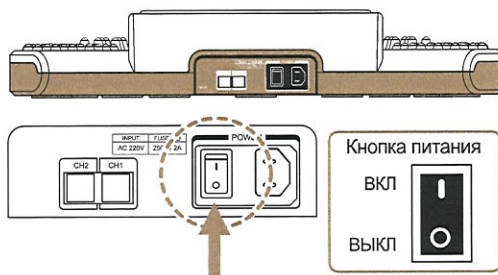


Шаг 1

Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.

Нажмите кнопку питания, находящуюся рядом с гнездом для кабеля электропитания, в состояние «Вкл».

Шаг 2

С помощью кнопки AUTO на панели управления выберите режим низкочастотного излучения. (Автоматический режим: A1~A4, 4 вида)

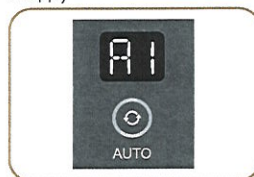

Шаг 3

С помощью кнопки TIME установите желаемое время использования. (Время устанавливается в пределах 10~30 мин. с шагом в 5 мин. Макс. время 30 мин.)



Шаг 4

Включите изделие долгим нажатием кнопки низкочастотных волн на отделе регулировки.



Шаг 5

Во время работы продукта, в верхней части прибора в зависимости от выходной частоты низкочастотного излучения мигает лампа (LED), а на низкочастотной площадке для ног лампа горит красным цветом.

Шаг 6

Используя кнопки '▲', '▼' на панели управления, установите мощность низкочастотного излучения. (Уровень 1~20)

Внимание

При первой установке обязательно поднимайте уровень с самого низкого. Поставьте обе ноги на площадку и медленно поднимайте мощность низкочастотного тока. Использование продукта сразу на высоком уровне мощности может привести к чрезмерному раздражению кожи.

Внимание

По истечению установленного времени прибор автоматически переходит в выключенное состояние.



Шаг 7

Начните использование прибора, поставив обе ноги на низкочастотную площадку для ног.



Внимание

Низкочастотные волны не генерируются, если хотя бы одна нога не соприкасается с зондом. Обязательно поставьте обе ноги. Если выходная мощность тока выше определенного уровня (4 уровень), то при снятии одной ноги с площадки раздается звуковой сигнал, а работа прибора приостанавливается. При повторном соприкосновении с ногой, прибор автоматически включается и работает на установленном ранее уровне мощности.

Шаг 8


[использование функции сохранения -сохранение настройки низкочастотных волн]
Можно сохранить используемые в основном настройки в состоянии по желанию(автоматически, время, мощность) с помощью кнопок Сохранить 1, 2 и с удобством использовать изделие.

- ① С помощью кнопки AUTO установите желаемый режим работы.
- ② Установите время работы.
- ③ Включите долгим нажатием на кнопку низкочастотные волны.
- ④ После завершения этапа настройки низкочастотных волн в состоянии эксплуатации можно сохранить настройки по желанию нажав на кнопку Сохранить 1(или Сохранить 2) и удерживая ее несмотря на сигнал оповещения 1, после второго сигнала оповещения 2 состояние настройки сохраняется. (таким же образом можно сохранить новые настройки при желании изменить настройки, сохраненные ранее)

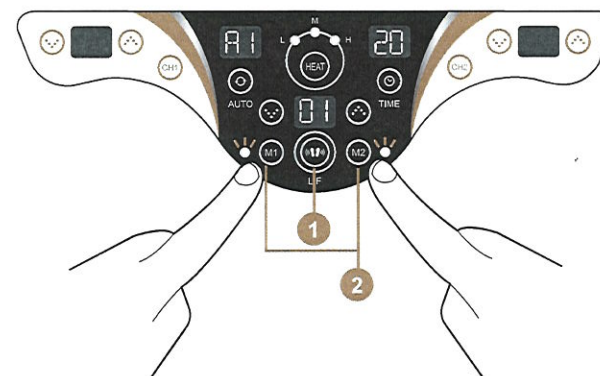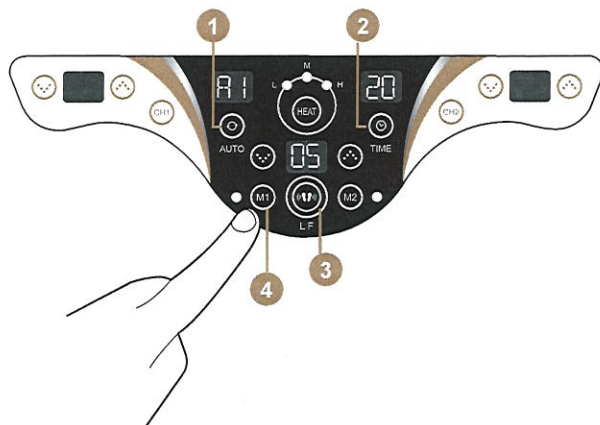

Шаг 9


[использование функции сохранения - вызвать сохраненную настройку низкочастотных волн]
Нажав кнопку низкочастотные волны в состоянии действия низкочастотных волн при нажатии кнопки Сохранить 1(или Сохранить 2) и отпустив кнопку после сигнала оповещения 1 можно использовать низкочастотные волны настроенные ранее. (при действии режима Сохранить 1, 2 загорается индикатор (LED))

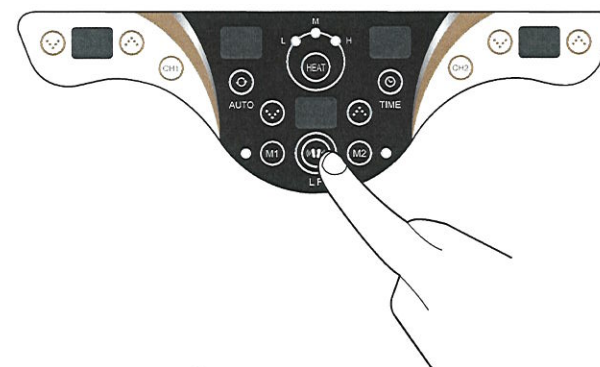

Шаг 10

Для завершения работы прибора еще раз нажмите на кнопку включения / выключения (LF).

После завершения использования прибора обязательно извлеките вилку электропитания из розетки.

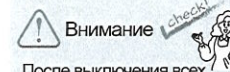


Внимание

После выключения всех функциональных кнопок включения/выключения, выключите переключатель электропитания и извлеките вилку из розетки.

При перемещении продукта отключайте вилку электропитания. Это может привести к повреждению прибора.


Включенное питание не используемого прибора может привести к поломке.

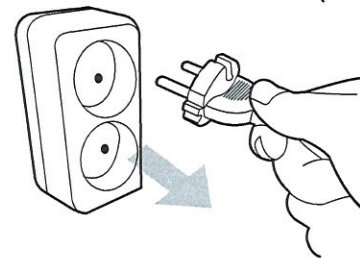

■ Способ использования низкочастотных накладок

Что такое низкочастотные накладки (низкочастотные рукоятки)?


Это устройство, которое, воздействуя на тело микротоком, способствует облегчению подкожной боли и стимулирует мышечную ткань.

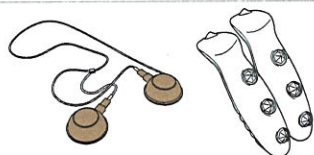


① Извлеките низкочастотные накладки (низкочастотные рукоятки).



② При использовании низкочастотных накладок: Если у вас отсутствует гель, намочите губку и вложите в низкочастотную накладку. Снимите или приподнимите одежду и приложите накладки к коже.

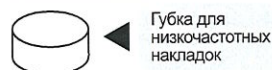

Выжмите намоченную губку так, чтобы вода не капала.

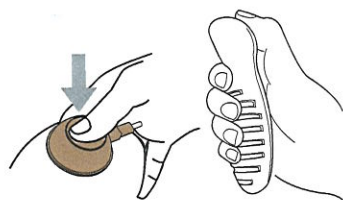


③ При использовании низкочастотных накладок: Приложите низкочастотную накладку с вложенной губкой к желаемой части тела и плотно прижмите.


При использовании низкочастотных рукояток: Крепко ухватите рукоятки в соответствии с формой под пальцы руки.

Различные способы использования низкочастотных накладок


Устройство можно использовать, прикладывая на разнообразные больные места для смягчения болевых ощущений. (Для широких частей тела, таких как плечи, живот и т.д. используйте накладки размера 'L', для небольших частей тела, таких как запястья, колени и т.д. используйте накладки размера 'S'.)

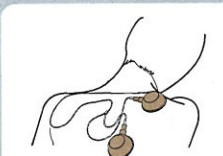

Использование накладки размера 'L'

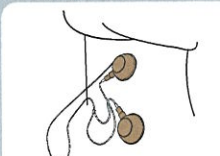

Использование накладки размера 'L'





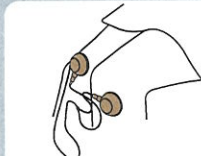


Использование накладки размера 'S'

■ Канал1 Способ применения

И информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.

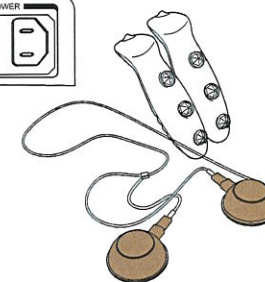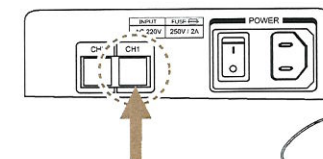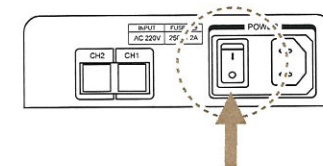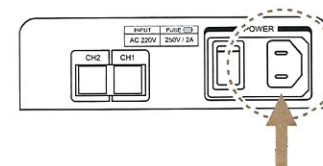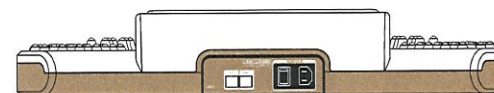

Шаг 1

Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.

Шаг 2

Нажмите кнопку питания, находящуюся рядом с гнездом для кабеля электропитания, в состоянии «Вкл».


Шаг 3

Подключите кабель низкочастотной накладки (низкочастотной рукоятки) к контактному выходу Канала 1.

И информация


При соединении и эксплуатации низкочастотных накладок, низкочастотных рукояток подключите к нужному каналу с учетом комфортности пользователя.

Вариант 1) Канал 1 = Низкочастотная рукоятка, Канал 2 = Низкочастотная накладка
Вариант 2) Канал 1 = Низкочастотная накладка, Канал 2 = Низкочастотная рукоятка

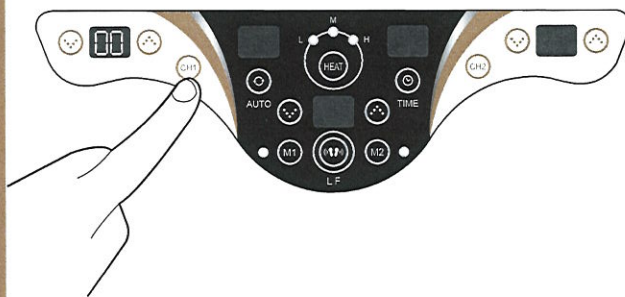


Шаг 4

Долгим нажатием на кнопку Канал 1 на отделе регулировки используйте режим низкочастотных волн.

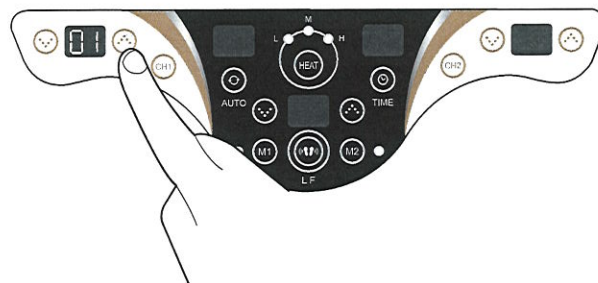

Шаг 5

Используя кнопки регулировки мощности '▲', '▼', установите желаемую мощность низкочастотного тока Канала 1. На дисплее (FND) отображается мощность низкочастотного тока Канала 1 (CH1). (Уровень мощности регулируется в пределах 1~20)

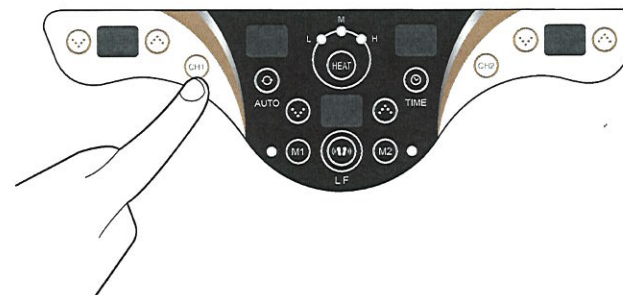


Шаг 6

При желании завершить эксплуатацию при повторном долгом нажатии кнопки Канал 1 происходит завершение.

Внимание

По истечению установленного времени (30 мин.) прибор автоматически отключается.

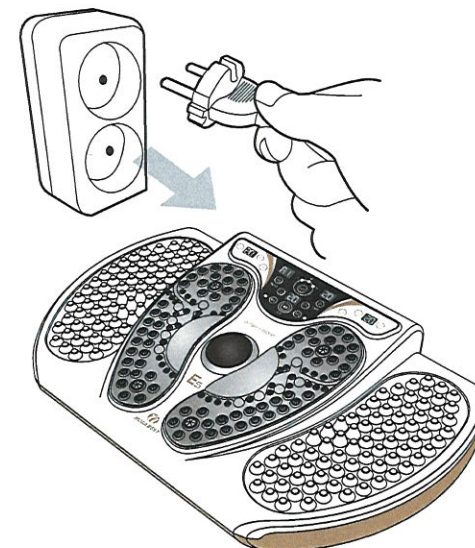

Шаг 7

После завершения использования прибора обязательно извлеките вилку электропитания из розетки.

Внимание

После выключения всех функциональных кнопок включения/выключения, выключите переключатель электропитания и извлеките вилку из розетки.




При перемещении продукта отключайте вилку электропитания. Это может привести к повреждению прибора.

Включенное питание не используемого прибора может привести к поломке.

■ Канал2 Способ применения

И информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.

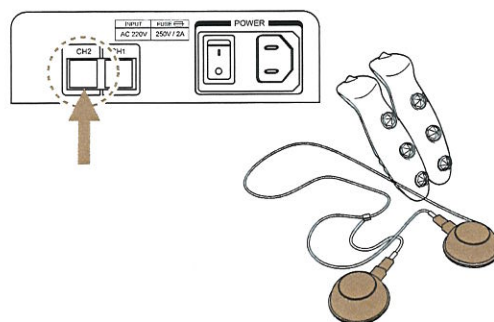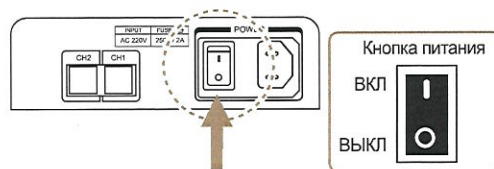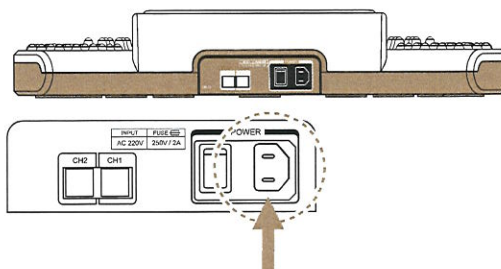

Шаг 1

Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.

Шаг 2

Нажмите кнопку питания, находящуюся рядом с гнездом для кабеля электропитания, в состояние «Вкл».

Шаг 3

Подключите кабель низкочастотной накладке (низкочастотной рукоятки) к контактному выходу Канала 2.


И информация

При соединении и эксплуатации низкочастотных накладок, низкочастотных рукояток подключите к нужному каналу с учетом комфортности пользователя.

Вариант 1) Канал 1 = Низкочастотная рукоятка, Канал 2 = Низкочастотная накладка

Вариант 2) Канал 1 = Низкочастотная накладка, Канал 2 = Низкочастотная рукоятка


Шаг 4

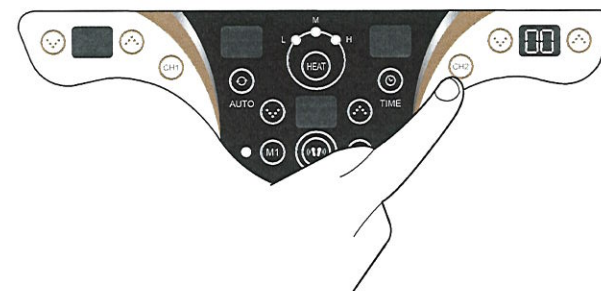

Долгим нажатием на кнопку Канал 2 на отделе регулировки используйте режим низкочастотных волн.




Шаг 5

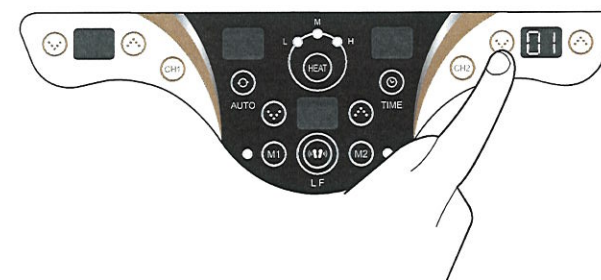

Используя кнопки регулировки мощности '▲', '▼', установите желаемую мощность низкочастотного тока Канала 2. На дисплее (FND) отображается мощность низкочастотного тока Канала 2 (CH2). (Уровень мощности регулируется в пределах 1~20)



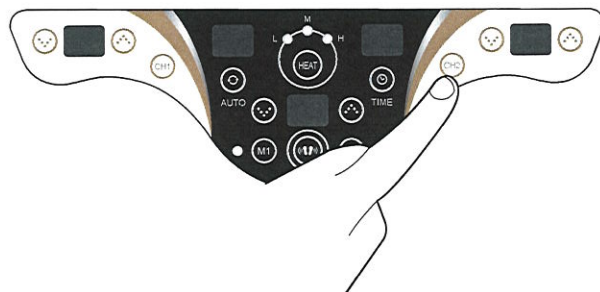


Шаг 6

При желании завершить эксплуатацию при повторном долгом нажатии кнопки Канал 2 происходит завершение.

Внимание

По истечению установленного времени (30 мин.) прибор автоматически отключается.

CH2

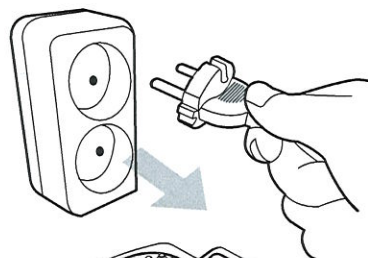

Шаг 7

После завершения использования прибора обязательно извлеките вилку электропитания из розетки.



Внимание

После выключения всех функциональных кнопок включения/выключения, выключите переключатель электропитания и извлеките вилку из розетки.


При перемещении продукта отключайте вилку электропитания. Это может привести к повреждению прибора.

Включенное питание не используемого прибора может привести к поломке.

Способ использования функции нагрева


Информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.

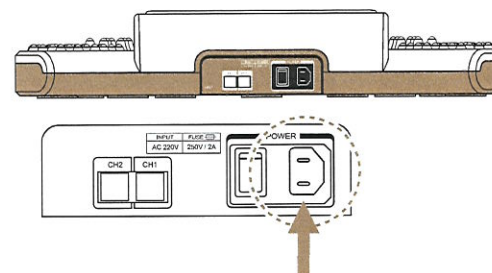


Шаг 1

Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.

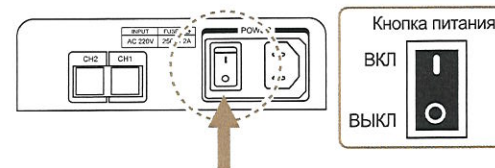


Шаг 2


Нажмите кнопку питания, находящуюся рядом с гнездом для кабеля электропитания, в состояние «Вкл».

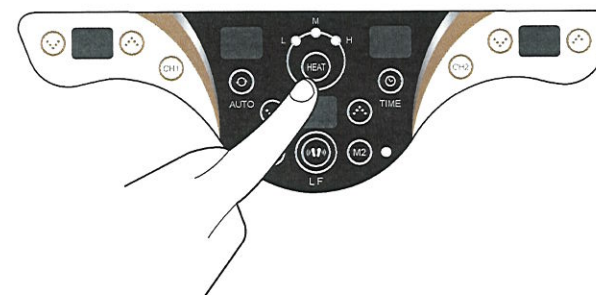

Шаг 3

Долгим нажатием на кнопку нагревание включите функцию нагрева.

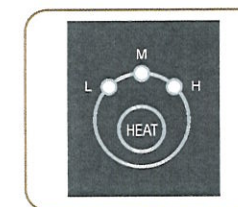


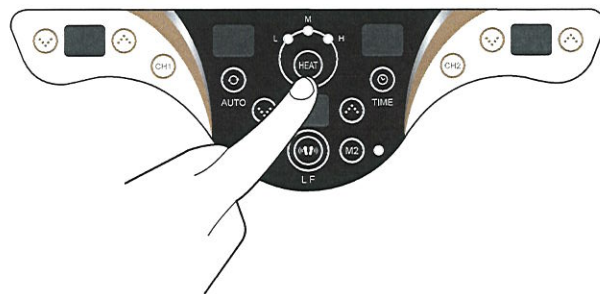

Шаг 4

Температура устанавливается коротким нажатием кнопки нагревания (HEAT).

L: около 50°C
M: около 60 °C
H: около 70°C

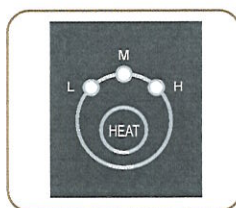


Шаг 5

Начните использование прибора, поставив обе ноги на область нагревания. После чего делайте шаги на месте.

Внимание

По истечению установленного времени нагревания (8 часов), прибор автоматически отключается.


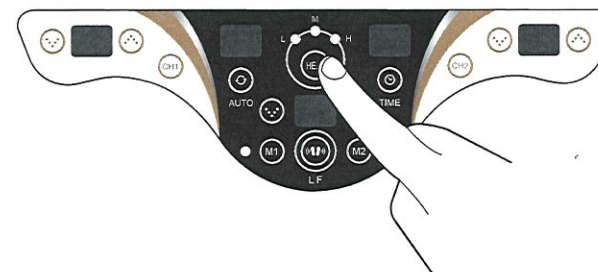


Шаг 6

Для завершения работы прибора еще раз нажмите на кнопку нагревания (HEAT).

Шаг 7

После завершения использования прибора обязательно извлеките вилку электропитания из розетки.

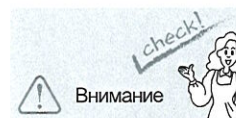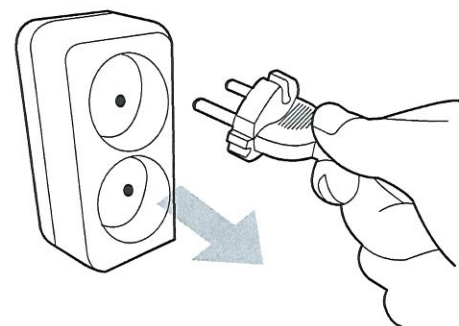

После выключения всех функциональных кнопок включения/выключения, выключите переключатель электропитания и извлеките вилку из розетки.

При перемещении продукта отключайте вилку электропитания. Это может привести к повреждению прибора.



Включенное питание не используемого прибора может привести к поломке.

Способ применения регулятора

- Низкочастотные волны

Информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.
- При эксплуатации регулятора нажимайте на датчик приема регулятора.

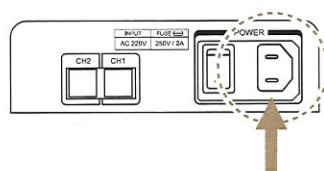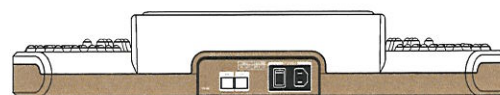


Шаг 1

Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.


Шаг 2

Нажав кнопку низкочастотных волн на регуляторе включите изделие.

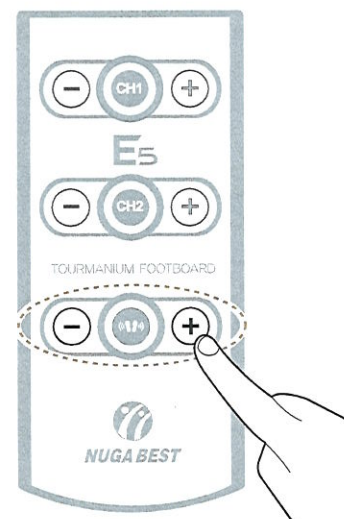

Шаг 3

Нажимая кнопки '-', '+', регулятора установите мощность низкочастотных волн.

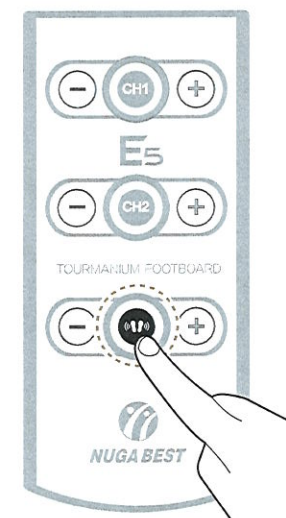



Шаг 4

При желании завершить эксплуатацию при повторном долгом нажатии кнопки низкочастотные волны происходит завершение.

- Способ использования Канала 1, 2

Информация

- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не поддерживается.
- При эксплуатации регулятора нажимайте на датчик приема регулятора.

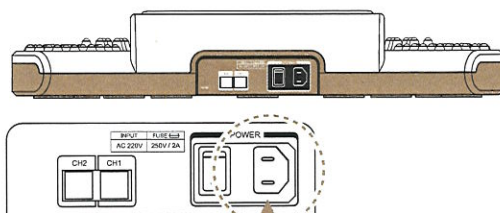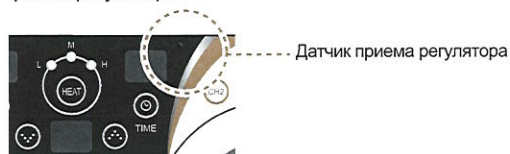

Шаг 1



Подключите штекер кабеля электропитания в гнездо на задней стороне прибора и вставьте вилку в розетку. Перед использованием обязательно проверьте рабочее напряжение тока.

Шаг 2

Нажав кнопку Канал 1(CH1) на регуляторе включите изделие.

Внимание

Канал 2 (CH2) включается аналогичным образом.

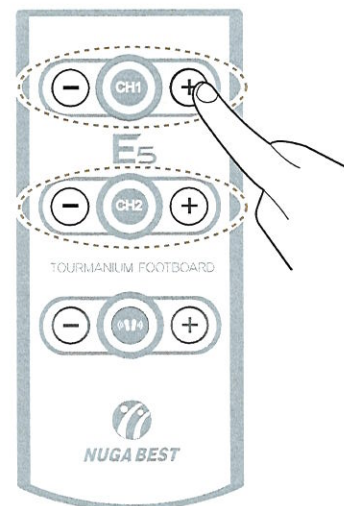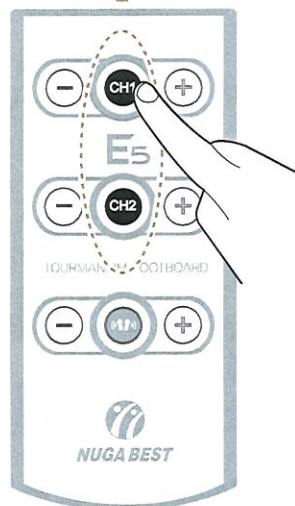


Шаг 3

Используя кнопки регулировки мощности '-', '+' на пульте управления, настройте мощность низкочастотного тока Канала 1. На дисплее (FND) отображается мощность низкочастотного тока Канала 1 (CH1). (Уровень мощности регулируется в пределах 1~20)

Внимание

Канал 2 (CH2) включается аналогичным образом.

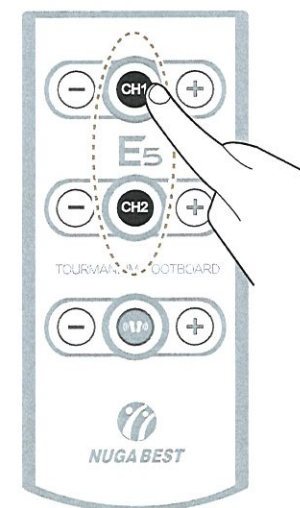


Шаг 4

При желании завершить эксплуатацию при повторном долгом нажатии кнопки Канал 1(CH1) происходит завершение.

Внимание

Канал 2 (CH2) включается аналогичным образом.

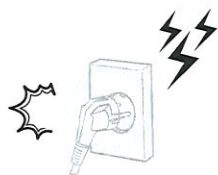


При появлении искры сразу же прекратите использование и выньте шнур питания из розетки.



При появлении запаха гари или дыма немедленно прекратите использование и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



При появлении расстройств в организме немедленно прекратите использование изделия и проконсультируйтесь с врачом.

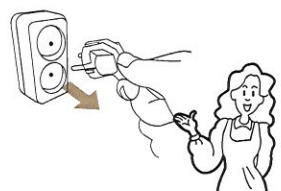

При обнаружении поломки или сбоя питания немедленно отключите изделие нажатием кнопки питания и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



В случае попадания воды на изделие немедленно отключите его нажатием кнопки питания, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в офис продаж или сервисный центр.

E5



Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования	34
Пункты самопроверки	35
Прежде чем обратиться в сервисный центр ..	36
Возможные неисправности	37
Параметры изделия	38
Гарантийный талон	39

Предупреждение

1. Если изделие не используется длительное время, необходимо отключить его и вынуть шнур питания из розетки.
2. Условия хранения.
 - ① Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
 - ② Хранить в месте, защищенном от прямого воздействия природных условий (перепады температуры и атмосферного давления; сквозняк; прямые солнечные лучи; пыль и т.д.).
 - ③ Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
 - ④ Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
 - ⑤ Комплектующие хранить в чистом сухом месте.

Требования к окружающим условиям


- В момент использования температура воздуха в помещении: 0~35°C; влажность: 20~80%.
- Хранить при температуре: -25~70°C; влажности: 20~80%; атмосферном давлении: от 700 до 1060 гПа.

Правила ухода за изделием



Внимание

Перед чисткой изделия обязательно выключите его и выньте шнур питания из розетки.

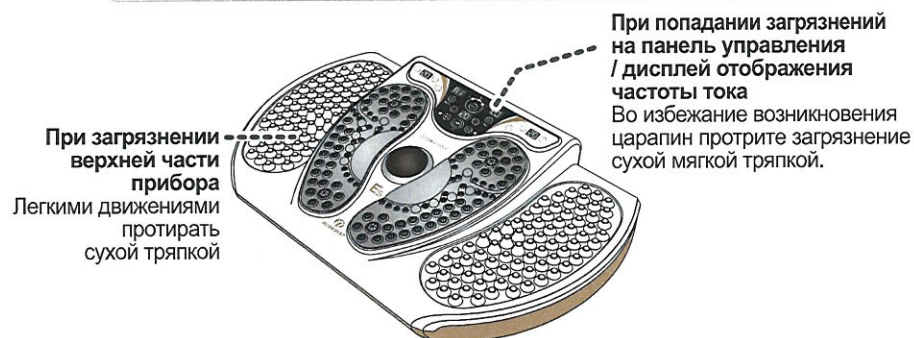

Внимание

Перед использованием обязательно проверьте нижеследующие пункты, в противном случае существует опасность поломки изделия, возгорания или получения травмы.

Контрольный список для проверки перед использованием

- | | |
|---|---|
| 1. Проверьте целостность кабеля электропитания и соединительных проводов. Нет ли проблем в соединении? | Да ☒ Нет ☐ |
| 2. Исправно ли работает дисплей (FND) и лампы (LED) при включении питания прибора? | Да ☒ Нет ☐ |
| 3. Нет ли проблем с чрезмерным повышением температуры нагревания и т.д.? | Да ☐ Нет ☒ |
| 4. Нет ли проблем в работе низкочастотного тока? | Да ☒ Нет ☐ |
| 5. Не находится ли прибор в месте с высоким уровнем влажности, пыли, утечкой химических веществ и т.д.? | Да ☒ Нет ☐ |

Контрольный список для проверки после использования

- | | |
|---|---|
| 1. Отключается ли работа нагревателя по истечению установленного времени? | Да ☒ Нет ☐ |
| 2. Отключается ли работа низкочастотного тока по истечению установленного времени? | Да ☒ Нет ☐ |
| 3. Отключен ли дисплей отображения (FND) и лампы (LED)? | Да ☒ Нет ☐ |
| 4. Извлекли ли вы штекер электропитания из розетки? | Да ☒ Нет ☐ |
| 5. Не находится ли прибор в месте с высоким уровнем влажности, пыли, утечкой химических веществ и т.д.? | Да ☐ Нет ☒ |

Прежде чем обратиться в сервисный центр



Внимание

В случае обнаружения неисправностей, прежде чем обратиться в сервисный центр, обязательно проверьте нижеперечисленные пункты. Изделие необходимо использовать согласно инструкции, в противном случае оно может не работать даже в отсутствие поломок.

Пункты проверки при неисправности питания (лампа питания не горит)

Если подача электропитания не отображается на приборе

- ① Проверьте, хорошо ли подключена вилка электропитания к розетке.
- ② Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку питания на задней стороне прибора.
- ③ Проверьте рабочее напряжение сети.

Проверить при неисправности работы низкочастотного генератора

Если нет подачи электропитания для работы низкочастотного генератора

- ① Проверьте, хорошо ли подключена вилка электропитания к розетке.
- ② Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку питания на задней стороне прибора.
- ③ Проверьте рабочее напряжение сети.

Пункты проверки при неисправности нагревания (изделие не нагревается)

Если изделие не нагревается

- ① Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку питания на задней стороне прибора.
- ② Убедитесь, что установлена не слишком низкая температура.
- ③ Строго запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

Возможные неисправности



Внимание

При возникновении ошибки запрещается разбирать изделие. Отключите изделие, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Обозначение ошибки	Расшифровка обозначения	Место отображения
	Ошибка соединения низкочастотных волн	Дисплей отображения (FND) низкочастотных волн
	Ошибка подключения Канала 1 (CH1)	Дисплей отображения (FND) Канала 1 (CH1)
	Ошибка подключения Канала 2 (CH2)	Дисплей отображения (FND) Канала 2 (CH2)
	Кабель Канала 1 (CH1) не подключен	Дисплей отображения (FND) Канала 1 (CH1)
	Кабель Канала 2 (CH2) не подключен	Дисплей отображения (FND) Канала 2 (CH2)
	Разрыв датчика температуры (разрыв)	Дисплей отображения (FND) времени
	Замыкание датчика температуры (замыкание)	Дисплей отображения (FND) времени
	Перегрев	Дисплей отображения (FND) времени
	Ошибка передачи данных (Внутренняя ошибка передачи данных)	Дисплей отображения (FND) времени

